

CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI (VEQ)

Per assicurare la buona pratica di laboratorio e creare i presupposti per il miglioramento continuo della qualità viene garantito un ottimo livello dei controlli sia interni che esterni per le grosse serie analitiche.

Controlli di Valutazione Esterna di Qualità (Veq) per i seguenti settori:

Chimica Clinica
Oncologia
Infettivologia
Metabolismo
Epatite
Tiroide
Allergia
Fertilità

Tali controlli con periodicità trimestrale sono eseguiti con campioni forniti dall'Azienda DicoCare-VEQ.

Controllo di Valutazione Esterna di Qualità per il settore di Ematologia:
Controllo Ematologico 5 popolazioni quantitativo, periodicità quadrimestrale
Controllo di Valutazione Esterna di Qualità per il Settore Tossicologia-Droghe d'Abuso
Controllo semestrale su 8 Sostanze d'Abuso test qualitativo di Primo Livello.

Eseguiti con campioni forniti da DigitalPT- Policlinico S.Orsola Malpighi Bologna.

Controllo di Valutazione Esterna di Qualità per i parametri della Coagulazione forniti da IL Instrumentation Laboratory, Progetto qualitativo sotto l'egida F.C.S.A con periodicità semestrale.

CONTROLLO DI QUALITÀ INTERNO

IMMULITE 2000

Dosaggio ogni 14 giorni del controllo di qualità interno CQI DicoCARE CQ-CQIFER per i parametri compresi nel gruppo FERTILITÀ E GRAVIDANZA.

Dosaggio ogni 14 giorni dei controlli UNC1 e UNC2 allegati al kit Reagenti IgE SPECIFICHE (SPE) parametrati al ConIgE fornito.

Dosaggio mensile dei controlli LINC1 e LINC2 dell'INSULINA (INS).

Dosaggio ogni 14 giorni di un POOL INTERNO per gli esami PSA TOTALE E LIBERO (PSA 3Gen e Free PSA).
Dosaggio ogni 14 giorni di un POOL INTERNO per l'esame FERRITINA (FER).

VIDAS

Dosaggio ogni 14 giorni, all'atto della calibrazione, del controllo C1 fornito allegato a tutti i kit reagenti, sia per i dosaggi quantitativi che per le determinazioni qualitative.

Valido per linee Marcatori Tumorali, Sieroimmunologia, Marcatori Epatite A e B, Farmaci e HIV.

RADIOIMMUNOLOGIA

Dosaggio ogni 14 giorni dei controlli (Contro 1- 2) forniti nei kit della linea Diagnostica Tiroidea e linea Steroidi.

HIGEA IGG SPECIFICHE

Determinazione del controllo fornito sulla piastra del kit ALLER FOOD 45 SCREEN Radim ELISA, eseguito ad ogni determinazione.

ANTICORPI ANTI HCV

Determinazione bisettimanale dei controlli Negativo e Positivo allegati al kit reagenti RadimEIA.

OLYMPUS AU 400

Dosaggio giornaliero del controllo multiparametrico Livello 1 e 2 di beckman.

Dosaggio giornaliero dei controlli CHEMGOL distribuiti dall'azienda BIO-DEV Livello 1 e Livello 2.

CELL DYN 3500

Dosaggio settimanale del controllo di qualità fornito da Real Time D.S. Hematology Control composto da tre Livelli, alto, normale e basso.

SURE SCREEN READER

Dosaggio ad ogni serie analitica di controlli DrugGol di BIO-DEV nei Livello 1 e livello 3 , si eseguono inoltre i controlli interni MAS DOA-XSE forniti da Microgenics nei livelli 2 e livello 3.